

ANWEISUNGEN FÜR DIE BLUTENTNAHME MIT DEM TAP II

BEGINNEN WIR:

ANWEISUNGEN VOR DER VERWENDUNG VOLLSTÄNDIG LESEN



ENTNAHMEZUBEHÖR ZURECHTLEGEN

1 VERPACKUNG ÖFFNEN

Abdeckung von der losen Ecke aus vollständig von der Schale abziehen.

2 STELLE AUSWÄHLEN

Eine Stelle am Oberarm auswählen. Sichtbare Haare für ordnungsgemäße Anhaftung auf der Haut abrasieren.

3

Die Entnahmestelle für 4 Minuten erwärmen ⌚ 4:00 Minuten. Wenn die Stellung des Arms zu unbequem wird, Erwärmungsprozess abbrechen und zum nächsten Schritt gehen.

4 STELLE REINIGEN

Die ausgewählte Entnahmestelle mit einem Alkoholtupfer reinigen und vollständig trocknen lassen.

5 AUFLAGE ABZIEHEN

Die Auflage von der Unterseite des TAP II abziehen und entsorgen. **Klebeseite nicht berühren.**

! POSITIONIERUNG

Schritt 6 sorgfältig beachten!

Das Entnahmeröhrchen muss bei Positionierung auf dem Arm in Richtung Ellenbogen zeigen.

Die Klebeseite des TAP II kann nur ein Mal auf die Haut appliziert werden.

6 POSITION

TAP II auf den Oberarm platzieren, wobei das Entnahmeröhrchen in Richtung des Ellenbogens zeigt.

Das Gerät durch festes Drücken am Arm anheften. Das Gerät nicht bewegen oder neu positionieren.

7 KNOPF DRÜCKEN

TAP II bei sich selber verwenden?

Gerät seitlich umgreifen und Knopf mit Fingern herunterdrücken.

TAP II bei einer anderen Person verwenden?

Eine Hand hinter den Arm des Patienten platzieren. Den Arm umfassen, um Unterstützung zu leisten. Mit der anderen Hand den Knopf fest drücken.

ODER

Knopf FEST und vollständig in das Gerät drücken, bis ein KLICK hörbar ist.

„KLICK“

Knopf bei Bedarf mit der Handfläche herunterdrücken.

8 HAND ZURÜCKZIEHEN

Hand vom Gerät nehmen. Der Knopf springt wieder hoch. Zeitschaltuhr einschalten. ⌚ Maximal 4:00 Minuten.

! ZEITMESSUNG

Möglicherweise fließt das Blut nicht sofort.

Die Entnahme sollte nach höchstens 4 Minuten abgeschlossen sein.

Seien Sie vorbereitet, die Blutprobe nach Schritt 10 schnell zu mischen.

9 RÖHRCHEN FÜLLEN LASSEN

Den Arm in vertikaler Position hängen lassen, wobei das Röhrchen gerade auf den Boden zeigt.

Durch die Schwerkraft fließt das Blut in das Röhrchen.

10 BIS FÜLLSTANDLINIE(N) FÜLLEN

Zwischen den Doppellinien

Oberhalb der einzelnen Linie

Wenn das Blut die Ziellinie erreicht hat ist ODER nach Ablauf von 4 Minuten ab Schritt 7, mit dem nächsten Schritt fortfahren.

11a GERÄT

Gerät seitlich umgreifen und Gerät langsam vom Arm wegziehen. Röhrchen zu jeder Zeit nach unten gerichtet halten.

Unverzüglich mit Teil b fortfahren.

b RÖHRCHEN ABNEHMEN

Das Röhrchen mit einer Hand aufrecht halten. Mit der anderen Hand das Gerät LANGSAM vom Röhrchen wegbiegen.

Das Röhrchen mit dem Deckel fest verschließen.

Unverzüglich mit Teil c fortfahren.

c BLUT

Das Röhrchen ein- oder zweimal kräftig schütteln, damit das Blut innerhalb des Röhrchen bewegt wird.

Das Röhrchen mindestens 10 weitere Male umdrehen, um den gesamten Innenraum des Röhrchens zu benetzen.

Das Röhrchen sollte wie mit Blut beschichtet aussehen.

12 ENTSORGEN

Entnahmestelle mit Gaze reinigen und Pflaster aufbringen.

Anweisungen für den Transport des Röhrchens ins Labor für die Analyse befolgen.

TAP II-Gerät ordnungsgemäß entsorgen.

Fertig!

Anwendungsgebiet

Das TAP II-Blutentnahmegesetz wird zur Entnahme von Kapillarblut für Tests verwendet, die eine kleine Menge Blut benötigen. Kapillarblutproben sollten von Erwachsenen (im Alter von mindestens 21 Jahren) entnommen werden.

Die Proben können zum Testen mit Systemen verwendet werden, die Serum bzw. Blut akzeptieren, das mit Lithium-Heparin antikoaguliert wurde. Das TAP II-Blutentnahmegesetz kann von einem Laien oder medizinischem Personal verwendet werden.

Beschreibung

Das TAP II-Blutentnahmegesetz ist ein Kunststoffgerät für die Entnahme von Blutproben unter Vakuum. Das Gerät verfügt über Mikronadeln, die Hautpunktionen für den Zugang zum Blut erzeugen. Das Gerät wird bei Erwachsenen verwendet und am Oberarm in einem Bereich mit möglichst wenig Haaren angebracht. Mit dem Gerät kann ausreichend Blut für Tests entnommen werden, die weniger als 250 µl Vollblut benötigen.

Nach dem Auslösen entnimmt das Gerät Blut in das Röhrchen und zeigt Fülllinien zur Bestätigung an, dass die Entnahme abgeschlossen ist. Das Röhrchen enthält entweder Lithium-Heparin bzw. Lithium-Heparin mit Gel zum Testen von Plasmaproben oder einen Gerinnungsaktivator bzw. Gerinnungsaktivator mit Gel zum Testen von Serumproben. Das Gerät ist für die Verwendung durch einen Laien oder medizinisches Personal vorgesehen. Das Gerät wird steril in einer Kunststoffschale geliefert.

Lagerung

Bei 18–28 °C lagern.

Vorsichtsmaßnahmen

- TAP II ist ein Einweg-Gesetz. Nicht wiederverwenden.
- TAP II an eine Stelle auf dem Oberarm mit möglichst wenig Haaren platzieren, um eine gute Anhaftung zu gewährleisten.
- TAP II nicht auf verletzter Haut verwenden (Verletzung, Schwellung, Ausschlag).
- Nicht bei Allergie gegenüber Edelstahl verwenden.
- Röhrchen, die Lithium-Heparin enthalten, nicht für die Bestimmung von Lithium verwenden.
- Bei Verwendung in Gesundheitseinrichtungen die Leitlinien des Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI) oder Leitlinien Ihrer Einrichtung hinsichtlich Erwärmung vor der Entnahme von Kapillarblut befolgen.

Warnhinweise

- Nicht verwenden, wenn Verpackung punktiert ist.
- Nach Ablauf des Verfalldatums nicht mehr verwenden.
- TAP II nach Anhaftung auf der Haut nicht mehr bewegen.

SYMBOLERKLÄRUNG – NUR FÜR REFERENZZWECKE	
Symbol	Bedeutung
	Chargennummer
	Durch Strahlen sterilisiert
	Nicht wiederverwenden
	Bei 23±5 °C lagern
	Nicht re-sterilisieren
	Katalognummer
	Verwendbar bis: Jahr-Monat-Tag
	Siehe Gebrauchsanweisungen
	Produkt nicht verwenden, wenn es gebrochen, beschädigt oder offen ist

0459
EMERGO EUROPE
Prinsessegracht 20
2514 AP Den Haag
Niederlande

Hergestellt und vertrieben von:


BIOSYSTEMS
200 Boston Ave, Suite 3700
Medford, MA 02155 USA
+1 (617) 547-7246
www.7sbio.com

US- und internationale Patente angemeldet.


TAP II-Blutentnahmegesetz

VOR VERWENDUNG BITTE JEDEN SCHRITT IN DIESER BEDIENUNGSANLEITUNG LESEN UND BEFOLGEN

Entnahmezubehör

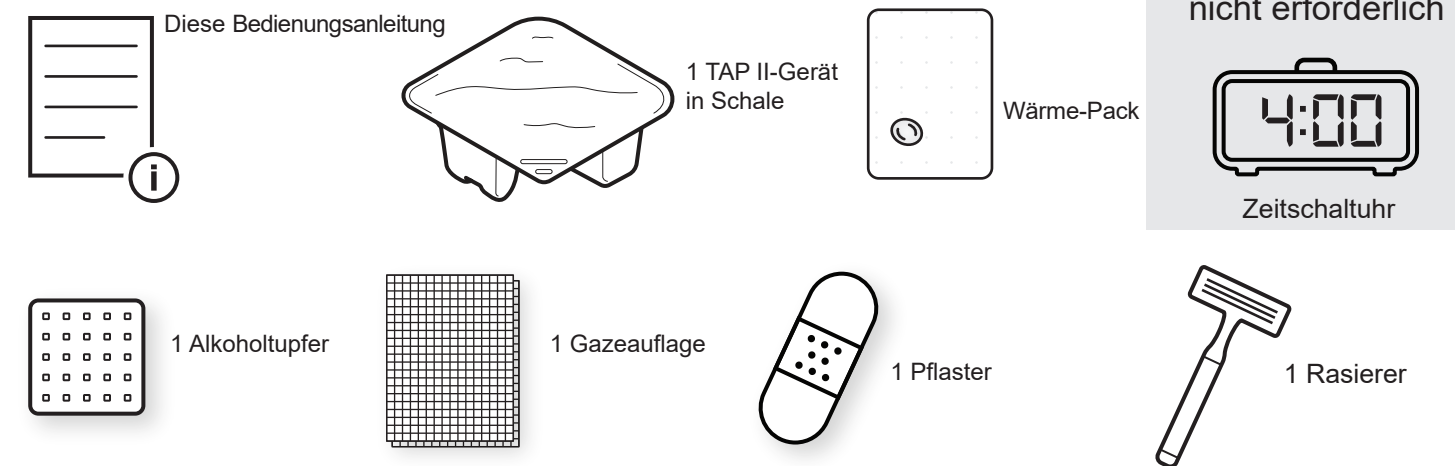

Überblick über TAP II

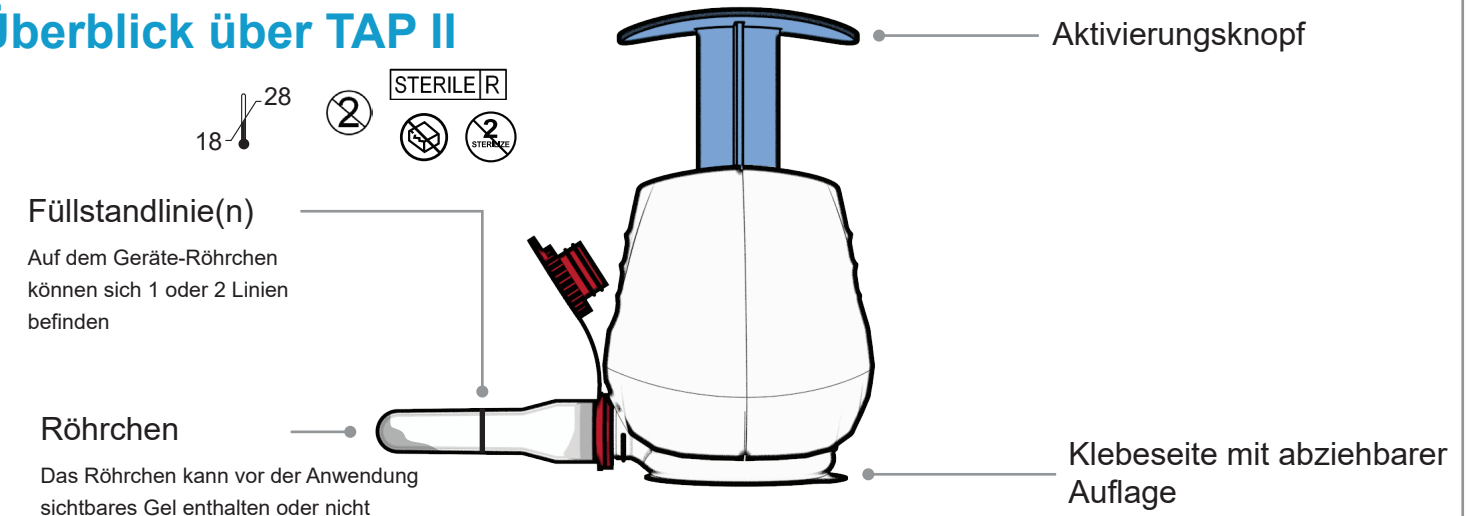

Ihr Ansprechpartner:

Fontisana Healthiness
Bahnhofstrasse 1
7208 Malans

+41 81 322 81 26
info@fontisana.ch
www.healthiness.ch

FontiSana
Healthiness.ch