

Kundeninfo-Testanleitung TAP Device

Sehr geehrte Kundinnen und Kunden

Nach dem neuen Medizinprodukte-Gesetz sind wir verpflichtet, die originale Anleitung eines zugelassenen Medizinproduktes dem Produkt beizufügen. Deshalb finden Sie in dem aktuellen Test-Kit TAP II die entsprechende Test-Anleitung des amerikanischen Herstellers.

Hiermit möchten wir Sie auf einige wichtige Änderungen hinweisen:

- Da der Hersteller zur Methodik des Anwärmens der Blutentnahmestelle nur Daten mit einem Wärme-Pack gesammelt hat, und das Reiben am Oberarm nicht getestet wurde, finden Sie nun ein Wärme-Pack, passend zur Anleitung im Testkit.
- Nach der Blutabnahme stecken Sie bitte das transparente Röhrchen vom TAP II in die braune Adapter-Röhre und senden uns diese mit Safety-Bag in unserem Versandumschlag zurück

Bitte beachten Sie ausserdem folgende Hinweise zur Testdurchführung:

1. Nüchtern durchführen, d.h. 12 Stunden keine Nahrung und 24 Stunden kein Alkohol.
2. Nach dem Aufstehen, d.h. zwischen 7 und 9 Uhr
3. Nicht unter Stress oder nach grosser körperlicher Anstrengung.
4. Vor der Einnahme von Medikamente oder Nahrungsergänzungsmittel am Morgen
5. Nur zwischen Montag und Donnerstag und nicht vor Feiertagen durchführen
6. Die Blutprobe am Tag der Blutentnahme an SwissAnalysis schicken

Wenn Sie Fragen haben, helfen wir Ihnen gerne weiter.

Ihr Fontisana Healthiness-Team